



DreamStation: Diseñada pensando en nuestros pacientes

Facilita la adherencia en pacientes con presiones superior o igual a 10 cm/H2O



 **Ez – Start**, proporciona una adaptación gradual y progresiva hasta alcanzar la presión prescrita durante los primeros 30 días de tratamiento, disminuyendo así, la probabilidad de abandono de la terapia.


La función **Ez- Start**, se recomienda a pacientes mayores de 40 años que tienen dificultad para tolerar presiones medias y altas.¹

Ayuda a reducir los efectos adversos del tratamiento

 **Check Mask**, comprueba el ajuste actual de la mascarilla, y guía al paciente en la correcta colocación y ajuste de la misma, previniendo cualquier fuga de aire.



Paciente activo y médico más informado

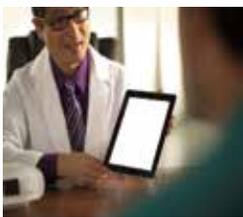

 **Multi-Conectividad**, cuenta con Bluetooth integrado, y brinda la opción de modem Wi-Fi o 3G, permitiendo una telemonitorización y seguimiento del tratamiento por parte del médico o proveedores de servicio, en tiempo real.

¹Estudio Clínico CPAP en pacientes con OSA – Prueba realizada en Sleep Center of Alabama, Birmingham, AL, que concluyó mejoras significativas en este tipo de pacientes.

Descripción de Opciones DreamStation

CPAP-Check	Permite una evaluación empírica de la presión prescrita, mediante una valoración de eventos cada 30 horas, aumentando o bajando la presión, según el IAH actual.
EZ-Start	Reduce la presión de terapia los primeros días, aumentando gradualmente hasta la presión prescrita. Cada sesión de terapia de > 4 horas, incrementa la presión 1 cmH2O. A los 30 días si no se ha alcanzado la presión prescrita, subirá 1 cmH2O por día hasta alcanzarla.
Optistart	Inicia sesión de terapia de AutoCPAP con presión inicial cercano al 90% previa, para reducir la posibilidad de eventos residuales al inicio de la sesión.
A-Trial	Habilita la terapia AutoCPAP durante un nº de días (3-30 días).
SmartRamp	Trabaja como un AutoCPAP durante el periodo de rampa reaccionando a los eventos si ocurren. Si se alcanza bien la presión de prescripción o el auto mínimo, cambia al modo terapia. Si no se alcanza, sube al final de la rampa a razón de 1 cmH2O. Si no está activa esta opción la rampa es lineal.
Check Mask (Comprobación de Mascarilla)	Permite comprobar el ajuste de mascarilla antes de iniciar la terapia, midiendo el volumen de fuga existente.
Comprobación rendimiento	Sirve para detectar ciertos errores en el equipo. Permite comprobar el correcto estado de los diferentes componentes del equipo.
Tecnología Flex	Sirve para determinar el tipo (C-Flex, C-flex+, A-Flex o BiFlex según corresponda con el equipo) y el nivel de alivio (1,2,3) de la presión.
DreamMapper	App, que permite al paciente realizar un seguimiento y estimular su participación y adherencia al tratamiento.
Resumen 3 noches	Indicador visual del cumplimiento de las 3 últimas sesiones registradas. En color verde las de >4 horas, en gris las de <4 horas.